

ANLEITUNG ZUR PROBEGEWINNUNG

Scannen Sie den QR-Code
oder gehen Sie direkt auf:
<http://lead-horizon.org/basic>



„Sicherheit, Qualität, Verlässlichkeit. Die Testungen von LEAD Horizon schließen entscheidende Lücken in der Probengewinnung und –logistik für den Corona-Nachweis.“
Assoc.-Prof. Dr. med. Christoph Steininger

Dieses
Blatt
bitte sicher
verwahren.

Name der Testperson:

Dies ist Ihre Probennummer:

LEAD Horizon GmbH
Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien, Austria
www.lead-horizon.com

LEAD HORIZON

CORONA TEST

Auswertung im
zertifizierten
Partnerlabor

**PROBENAHEME
ERFOLGT
DURCH ANWENDER
BEHÖRDLICH
ANERKANNT**

**COVID-19
CORONAVIRUS**

Erstellt am: 30/09/20 Versionnummer: 1.0

- 1 Probenröhrchen
- 2 Salzlösung
- 3 Transferröhrchen
- 4 Siegelkleber
- 5 Beilagezettel
- 6 Schutzbeutel

GEBRAUCHSANWEISUNG CORONA TEST-SET

Zur eigenständigen Probenahme und Auswertung im Labor durch ein patentiertes Testverfahren

Bitte öffnen Sie die Seite: <http://lead-horizon.org/basic>, dort werden Sie durch den Prozess geführt. Bitte halten Sie für die Probenahme einen amtlichen Lichtbildausweis sowie Ihre Sozialversicherungsnummer bereit. Als Nachweis Ihrer Identität wird ein Foto von Ihnen mit Ihrem Ausweis aufgenommen, sowie ein Video von Ihrem Spülvorgang aufgezeichnet.

ANWENDUNG:

1. Angabe Ihrer persönlichen Daten

Nach Angabe Ihrer Email Adresse erhalten Sie einen Link, mit dem Sie Ihre Email verifizieren und im nächsten Schritt Ihre persönlichen Daten angeben können. Bitte beachten Sie, dass Ihre persönlichen Daten für die Auswertung und Ergebniszustellung benötigt werden.

2. Identitätsnachweis

Im nächsten Schritt erfolgt der Identitätsnachweis. Halten Sie dazu bitte Ihren amtlichen Lichtbildausweis bereit und erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Kamera. Nehmen Sie bitte ein Foto mit sich und Ihrem Ausweis unterhalb oder neben Ihrem Gesicht auf. Benützen Sie dazu die Kamera Ihres Smartphones oder Ihre WebCam vom PC/Laptop/Tablet.

3. Mundspülung

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, die Salzlösung (2) vor der laufenden Kamera zu öffnen, in den Mund zu nehmen und bei geschlossenem Mund 1 Minute lang gründlich zu spülen. Diese füllen Sie noch während der Aufnahme mit dem Transferröhrchen (3) in das Probenröhrchen (1) bis ca. 1-2 cm unter den Rand. Halten Sie dann Ihr Probenröhrchen (1) mit der Probennummer gut lesbar in die Kamera, verschließen Sie dieses mit der roten Kappe und kleben Sie einen Siegelsticker (4) seitlich über den Verschluss. Das Video erst nach dem Versiegeln beenden und hochladen.

4. Test-Set verpacken

Geben Sie nun das verschlossene und versiegelte Probenröhrchen (1) in den Schutzbeutel (6). Bitte verschließen Sie den Schutzbeutel (6) gut und entsorgen Sie die Salzlösung (2) sowie das Transferröhrchen (3). Bitte verwahren Sie diese Packungsbeilage (5) mit Ihrer Probennummer sicher und senden diese NICHT zurück. Den verschlossenen Schutzbeutel (6) geben Sie nun wieder zurück in die Box und verschließen diese mit einem Siegelsticker (4).

5. Test-Set versenden

Nähere Informationen zum Versand erhalten Sie in der WebApp.

MÖGLICHE TESTERGEBNISSE:

- Positiv (mit SARS-CoV-2 infiziert)
- Negativ (NICHT infiziert)
- Indifferent (es konnte kein Ergebnis erzielt werden)

Das Labor ist verpflichtet alle Ergebnisse österreichischer Proben im epidemiologischen Meldesystem (EMS) zu registrieren. Die Auswertung der Probe erfolgt mittels PCR-Verfahren durch ein zertifiziertes Partnerlabor von LEAD Horizon GmbH. Nach der Probenahme erhält der Anwender keine Information über seinen pathologischen Zustand. Das Testergebnis wird erst durch die Auswertung der Probe im zertifizierten Labor mittels PCR-Verfahren erstellt und dem Anwender zur Verfügung gestellt.

INHALTSSTOFFE:

- 2,5 ml 0,9% NaCl Lösung (2)
- 2 ml Transportpuffer (1)

LAGERUNG:

- Bei 4° - 25° C lagern!
- Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung

WICHTIGE INFORMATIONEN:

- Probenahme erfolgt durch Anwender, Auswertung im Labor
- verpflichtender Identitätsnachweis mit amtlichen Lichtbildausweis durch Kamera
- internetfähiger Computer mit Webcam oder Smartphone erforderlich
- In-vitro Diagnostikum

ZWECKBESTIMMUNG:

Das Corona Test-Set dient dem Nachweis einer SARS-CoV-2 Infizierung. Es erfolgt lediglich die Probenahme durch den Anwender. Die molekularbiologische Analyse der Probe erfolgt nicht durch den Anwender. Die molekularbiologische Analyse der Probe mittels PCR-Verfahren erfolgt durch ein zertifiziertes Partnerlabor von LEAD Horizon GmbH. Das Testergebnis wird dem Anwender erst nach der molekularbiologischen Auswertung im Labor per E-Mail zugesendet. Das Corona Test-Set inkludiert ein Kit zur Probenahme sowie die Leistung eines zertifizierten molekularbiologischen Partnerlabors von LEAD Horizon GmbH. Diverse Begriffsbestimmungen können in den FAQs auf www.lead-horizon.com/haeufig-gestellte-fragen nachgelesen werden.

ENTSORGUNG:

- Transferröhrchen im Papiermüll entsorgen
- Gefäß der Salzlösung im Restmüll entsorgen

REF 9120112870047

